

## WIEDERAUFBEREITUNG DER FFP2-MASKEN:

- Prüfen Sie mit Hilfe eines Backthermometers, ob Ihr Ofen eine konstante Temperatur von 80° Celsius für eine Stunde hält. Einige Öfen variieren über die Zeit mit niedrigeren oder höheren Temperaturen. Beides schadet der Maske, beziehungsweise der Keimfreiheit.
- FFP2 Masken so kennzeichnen (zum Beispiel mit Stift markieren), dass eine persönliche Zuordnung möglich ist. Auch gereinigte Masken sollten nicht unter verschiedenen Personen getauscht werden.
- Masken nach dem Tragen mindesten bis zum nächsten Tag an der Luft trocknen lassen. Sie sollte nicht mit anderen Gegenständen oder Personen in Berührung kommen.
- Masken auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech oder einen Rost legen. Ofen vorheizen auf 80° Celsius. Benutzen Sie keine Umluft/Heißluft, das könnte die Keime verwirbeln. Achten Sie auf ausreichende Vorheizzeit, da niedrigere Temperaturen die Viren nicht sicher abtöten (siehe oben).
- Schieben Sie das Blech so in den Ofen, dass der Abstand zu Ober- und Unterboden mindestens zehn Zentimeter beträgt. Zu kleine Öfen eignen sich nicht für diese Methode.
- Erhitzen Sie die Masken 60 Minuten im geschlossenen Ofen bei 80°. Die Tür sollte in der Zwischenzeit nicht geöffnet werden. Lassen Sie den Ofen nicht unbeaufsichtigt.
- Nach 60 Minuten können Sie die Masken entnehmen und auf Blech oder Rost auskühlen lassen. Prüfen Sie die Maske und Haltebänder auf Schäden und ordnen Sie die Masken gegebenenfalls der richtigen Person zu.

## ODER

- Eine andere Möglichkeit ist, die Masken für sieben Tage durchgehend an der Luft trocknen zu lassen. Auch dies reduziert die Keimbelastung von SARS-CoV-2 und eignen Keimen in den Untersuchungen deutlich. Achten Sie hierbei auf Folgendes:
- Kennzeichnen Sie die Masken so, dass sie den Nutzenden sicher zugeordnet werden können. Es sollte kein Tausch der Masken unter verschiedenen Personen stattfinden.
- Suchen Sie einen trockenen Ort, an welchem Sie die Masken mit ausreichend Abstand (sie sollten sich nicht berühren) nebeneinander aufhängen können - zum Beispiel an der Wand mit Nägeln oder Haken oder auf einer Wäscheleine. Küche, Bad und andere Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit eignen sich hierfür nicht.
- Kennzeichnen Sie jeden Platz mit einem Wochentag. So werden Verwechslungen vermieden.
- Nun können Sie die Masken nach dem Tragen an dem entsprechenden Ort aufhängen. Dort muss die Maske sieben Tage hängen bleiben, bis Sie sie erneut verwenden können.

**BEI UNSICHERHEITEN FRAGEN SIE BITTE IMMER IHRE LEITUNG!**

## 1 EINHALTEN DER BEKANNTEN HYGIENEREGELN!

- a) Abstand von 1,5 Metern überall wo möglich
- b) Zusätzliches Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bei kurzen Kontakten (maximal 5 Minuten) mit anderen Personen
- c) regelmäßiges Händewaschen
- d) allgemeine Kontaktreduzierung (lieber im Nachbarbüro anrufen, als vorbeischaun)
- e) regelmäßiges Stoßlüften der Räume (siehe hierzu auch die Hinweise zum Lüften im Infoportal)

## 2 HOMEOFFICE

ZUR KONTAKTREDUZIERUNG AM ARBEITSPLATZ UND ZUR ENTLASTUNG DES ÖPNV,  
WENN BETRIEBLICH MÖGLICH.

Sprechen Sie hierzu bitte Ihre Leitung an!

Homeoffice möglich: **JA**

Homeoffice möglich: **NEIN**

Abstand von 1,5 Metern zu einer anderen Person kann **NICHT** sicher gewährleistet werden

Abstand von 1,5 Metern zu einer anderen Person kann regelmäßig sicher gewährleistet werden

**FFP2-MASKE ODER MEDIZINISCHER-MUND-NASENSCHUTZ IST IN DIESEN SITUATIONEN VERPFLICHTEND ZU TRAGEN**

- diese Masken werden vom Arbeitgeber für betroffene Mitarbeitende gestellt
- pro bezugsberechtigten MA werden 5 dieser Masken für 14 Tage ausgegeben
- pro Arbeitstag ist eine dieser Maske zu tragen
- diese Masken müssen an dienstfreien Tagen wiederaufbereitet werden ([SIEHE KASTEN WIEDERAUFBEREITUNG](#))
- nach der 2. Woche erhält der MA über die Einrichtung 5 neue dieser Masken

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise  
zum Tragen von FFP2-Masken während der Arbeit!  
([SIEHE KASTEN: „HINWEISE ZUM TRAGEN VON FFP2-MASKEN“](#))

**FFP2-MASKE IST NICHT VERPFLICHTEND ZU TRAGEN**  
(ES GILT WEITERHIN DIE EINHALTUNG DER HYGIENEREGELN  
- SIEHE PUNKT 1)

## HINWEISE ZUM TRAGEN VON FFP2-MASKEN:

- Tragen Sie die Maske nur in Situationen, in denen Sie länger als 5 Minuten keine Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen halten können
- Machen Sie regelmäßige Tragepausen von der FFP 2 Maske → planen Sie Ihre Tätigkeiten entsprechend
- die Maske sollte in den Tragepausen offen aufgeklappt und an der frischen Luft trocknen (z. B. nicht in der Jackentasche)
- die maximale Tragedauer am Stück sollte grundsätzlich 75 Minuten nicht überschreiten, dann ist eine Tragepause (nicht Arbeitspause) von mindestens 30 Minuten empfohlen



Diese Regelungen gelten als Mindeststandart für Mitarbeitende der Diakonie Hochfranken. Sollten in ihren Einrichtungen (z. B. stationäre Altenhilfe oder Eingliederungshilfe) weitergehende Regelungen gelten, sind diese zwingend einzuhalten. Bei Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an Ihre Leitung.